

Приготовление 2% рабочего раствора средства:

Концентрация ра- бочего раствора, % (по препарату)	Количество средства и воды (мл), необходимые для приготовления:			
	1 л раствора		2 л раствора	
	средство	вода	средство	вода
2,0	20,0	980,0	40	1960

Все режимы применения:

Для обеззараживания стоматологических отсасывающих систем через отсасывающие шланги прокачивают рабочий раствор (не менее 1 л) средства и оставляют в установке на 15 минут, время дезинфекционной выдержки при контаминации микобактериями туберкулеза 60 минут. По окончании времени экспозиции раствор из системы сливают и промывают ее проточной питьевой водой не менее 2 минут. Дезинфекцию отсасывающих систем проводят ежедневно между сменами и в конце рабочего дня. Наконечники к отсасывающим системам (слуноотсосы) обеззараживают после применения способом погружения в раствор на 15 минут, в случае обеззараживания объектов, контаминированных микобактериями туберкулеза, время дезинфекционной выдержки увеличивается до 60 минут. Плевательницы заливают 2% раствором средства на 15 мин (60 минут при туберкулезе). После окончания дезинфекции наконечники и плевательницы промывают проточной водой не менее 5 минут.