

АКТИВНАЯ ОЧИСТКА И ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Sekusept® aktiv

Высокоэффективный препарат на основе надуксусной кислоты
с отличными моющими свойствами

Сочетание таких свойств в одном продукте как активная очистка, эффективная дезинфекция и отличная совместимость с обрабатываемыми материалами делают препарат Sekusept Aktiv действительно уникальным в своем классе как для пользователя, так и для обрабатываемого инструментария.

Sekusept Aktiv – это:

- ▲ Быстродействие
- ▲ Экономичность
- ▲ Удобство для пользователя



Sekusept® aktiv

Высокоэффективный препарат на основе надуксусной кислоты с отличными моющими свойствами

Почему Sekusept aktiv?

ОЧИСТКА

Работая над созданием препарата Sekusept Aktiv, специалисты компании Ecolab поставили перед собой задачу получить продукт, обладающий максимально эффективными моющими свойствами.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Инновационная формула препарата обеспечивает высокую эффективность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов и спор. В результате, у вас в руках высокоэффективный препарат с очень коротким временем экспозиции.

УДОБСТВО

Обладая отличными моющими свойствами и широким спектром эффективности, препарат Sekusept Aktiv может использоваться для всех циклов ручной обработки инструментов за счет отличной совместимости с обрабатываемыми материалами, обеспечивая, тем самым, длительный срок службы ваших инструментов.

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

ВИД ИНФЕКЦИИ	ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА	ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ
Вирусные, бактериальные (вкл. туберкулез), кандидозы, дерматофитии	Хирургические инструменты, в т.ч. вращающиеся, стоматологические, изделия из резин, металлов, пластмасс, стекла	0,5%	20 мин.
		1,0%	10 мин.
		2,0%	5 мин.
Вирусные, бактериальные (вкл. туберкулез), кандидозы, дерматофитии	Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним	1,0%	10 мин.
		2,0%	5 мин.
ДВУ	Жесткие и гибкие эндоскопы	1,0%	10 мин.
		2,0%	5 мин.
Стерилизация	Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, хирургические и стоматологические инструменты	1,0%	30 мин.
		2,0%	15 мин.

PEROXIBALANCE (ПЕРОКСИБАЛАНС)

За долгие годы работы специалисты компании Ecolab оптимизировали pH на нейтральном уровне, благодаря чему препараты на основе ПЕРОКСИБАЛАНСА безопасны для пациента, медицинского персонала и самого эндоскопа.

Не подходит для инструментов, изготовленных из латуни и меди, имеющих механические повреждения, а также для хромированных и никелированных инструментов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА С ПОМОЩЬЮ МЕРНОЙ ЛОЖКИ

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА	РАБОЧИЙ РАСТВОР			
	1л	2л	4л	10л
1%	10 г / 15 мл	20 г / 30 мл	40 г / 60 мл	100 г / 150 мл
2%	20 г / 30 мл	40 г / 60 мл	80 г / 120 мл	200 г / 300 мл
3%	30 г / 45 мл	60 г / 90 мл	120 г / 180 мл	300 г / 450 мл
4%	40 г / 60 мл	80 г / 120 мл	160 г / 240 мл	400 г / 600 мл
5%	50 г / 75 мл	100 г / 150 мл	200 г / 300 мл	500 г / 750 мл

АКТИВНЫЙ.
ЭФФЕКТИВНЫЙ.
НАДЕЖНЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для дезинфекции, ПСО, дезинфекции высокого уровня и стерилизации изделий медицинского назначения, включая гибкие и жесткие эндоскопы.

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Для подготовки рабочего раствора используйте прилагаемую мерную ложку. Добавьте требуемое количество порошка в питьевую воду, имеющую температуру 22-30°C, и тщательно размешивайте в течение 5 минут. После этого продукт готов к работе.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Погрузите обрабатываемые инструменты в рабочий раствор. Убедитесь, что все поверхности инструментов полностью находятся в растворе. Произведите очистку инструментов, следуя инструкциям производителя оборудования, включая механическую очистку (очистка щеткой, протирание салфеткой), пока все видимо загрязненные поверхности не будут очищены.

Извлеките инструменты из рабочего раствора, выдержав требуемое время, и промойте водой. Затем тщательно просушите внешние поверхности и внутренние каналы (например, у эндоскопов).

СОСТАВ

50г перкарбоната натрия моногидрата, 25г тетрацетилэтилендиамин (ТАЭД), активные антимикробные составляющие, неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Наименование продукта	Вид упаковки
3050530	SEKUSEPT AKTIV	1,5 кг X 4 шт.

Только для профессионального использования. Незначительное изменение цвета порошка возможно и никак не отражается на свойствах продукта при использовании до истечения срока годности препарата (см. на упаковке).

ECOLAB HEALTHCARE RUSSIA
Чисто. Безопасно. Эффективно.

 ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH

 0297

ОТДЕЛ БОЛЬНИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
ЗАО ЭКОЛАБ
115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
www.ru.ecolab.eu

40789, Германия
г. Монхайм-на-Рейне
Эколаб – Аллее 1
+49 (0) 2173 599 0

